

Széketminta gyűjtő készlet

CE IVD

Használati útmutató



BGI

1. LÉPÉS: GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY AZ ALÁBBI TÉTELEK A KÉSZLETBEN TALÁLHATÓAK

1. Műanyag mintagyűjtő kanál **(1. ábra)**
2. Mintagyűjtő cső tartósító folyadékkal **(1. ábra)**
3. Két mintagyűjtő papír **(1. ábra)**
4. Biohazard zsák **(1. ábra)**
5. Minta visszaküldési boríték **(1. ábra)**

(1. ábra)

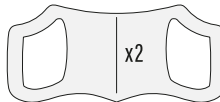
1



2



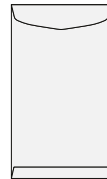
3



4



5



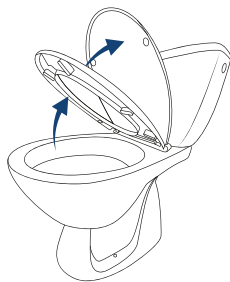
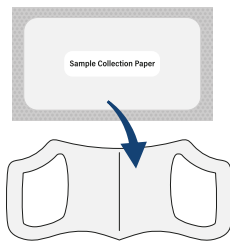
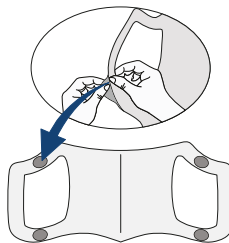
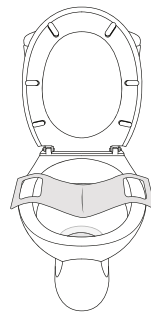
- Ha ezen tételek közül bármelyik hiányzik, ne használja a készletet. A készlet használata előtt olvassa el a visszaküldési útmutatót és az elérhetőségeket.

LÉPJEN TOVÁBB A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKRE, HA KÉSZEN ÁLL A SZÉKLETÜRÍTÉSRE.

- Olyan napon vegyen mintát, amikor a mintavételt követő **24 órán belül** vissza tudja azt küldeni.

2. LÉPÉS: HELYEZZE A MINTAGYŰJTŐ PAPIRT A WC-RE

- a. Emelje fel a WC fedelét és az ülőkét. **(2. ábra)**
 - b. Vegye elő a mintagyűjtő papírt. **(3. ábra)**
 - c. Távolítsa el a mintagyűjtő papíron lévő védőfóliákat, hogy szabaddá váljanak a ragasztócsíkok. **(4. ábra)**
 - d. Helyezze és ragassza a mintagyűjtő papír ragasztócsíkjait a WC peremére. **(5. ábra)**
- A megfelelő használat érdekében győződjön meg arról, hogy a mintagyűjtő papír lefelé ível, hogy a széklet ne érintkezzen a testével.
 - Ügyeljen arra, hogy a mintagyűjtő papír ne érintse a WC csészében lévő vizet.

**(2. ábra)****(3. ábra)****(4. ábra)****(5. ábra)**

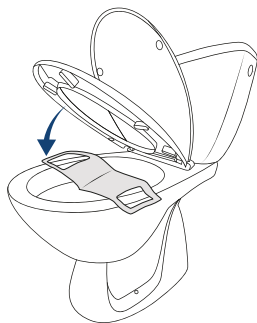
3. LÉPÉS: SZÉKLETÜRÍTÉS

Ha problémája van az üléssel és az állással a WC használata közben, kérjen segítséget.

a. Engedje le a WC-ülőkét a mintagyűjtő papírra. **(6. ábra)**

b. Üljön le a WC-re, és ürítsen a mintagyűjtő papírra. Ellenőrizze, hogy a mintagyűjtő papír megtartja-e a székletmintát.

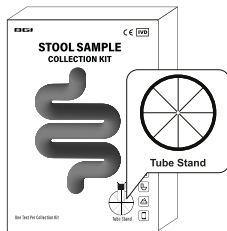
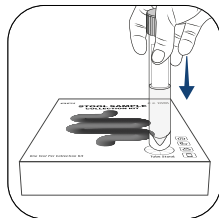
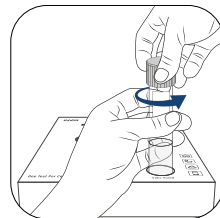
- Próbálja megakadályozni, hogy vizelet kerüljön a mintagyűjtő papírra és a székletmintára.
- **NE dobjon WC-papírt a mintagyűjtő papírra vagy a székletmintára.**



(6. ábra)

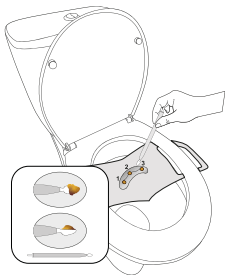
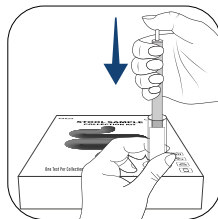
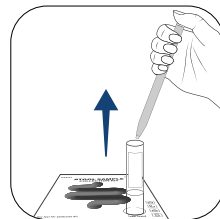
4. LÉPÉS: HELYEZZE A MINTAGYŰJTŐ CSÖVET A CSÓTARTÓBA

- a. Hajtsa le a mintagyűjtő készlet tetejét, és keresse meg a "Tube Stand"-el és körrel ellátott jelzést. **(7. ábra)**
- b. Fogja a mintagyűjtő csövet és szúrjon egy lyukat a mintagyűjtő készlet tetején lévő kör közepére, majd helyezze a mintagyűjtő csövet a csótartóra úgy, hogy a kupak felfelé nézzen. **(8. ábra)**
- c. Csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Ha szükséges, tartsa a csövet a másik kezével. **(9. ábra)**

**(7. ábra)****(8. ábra)****(9. ábra)**

5. LÉPÉS: VEGYEN SZÉKLETMINTÁT A MINTAGYŰJTŐ KANÁLLAL ÉS HELYEZZE A MINTÁT A MINTAGYŰJTŐ CSŐBE

- a. A mintagyűjtő kanalat használva vegyen egy teljes kanálnyi székletmintát a széklet felületének két vagy három különböző részéről. **(10. ábra)**
- b. Tegye a székletmintát tartalmazó kanalat a mintagyűjtő csőbe, amelyet a csőtartóra helyezett. Tolja a kanalat a gyűjtőcső aljára, hogy a minta teljesen elmerüljön a tartósító folyadékban. Nyomja meg a kanál nyelének tetejét, hogy leválassza róla a kanalat. **(11. ábra)**
- c. Óvatosan húzza ki a kanál nyelét a gyűjtőcsőből. A kanál nyelét az érvényben lévő hulladék kezelési szabályok figyelembe vételével dobja ki a szemétkébe. **(12. ábra)**

**(10. ábra)****(11. ábra)****(12. ábra)**

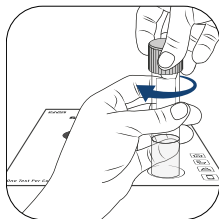
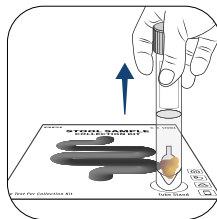
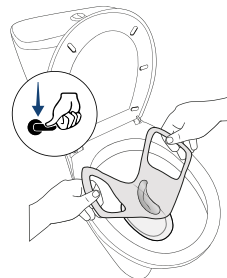
6. LÉPÉS: ZÁRJA LE A MINTAGYŰJTŐ CSÖVET, ÉS HÚZZA LE A WC-T

a. Zárja le a kupakot az óramutató járásával megegyező irányba csavarva. **(13. ábra)**

- Ha a kupak nincs megfelelően lezárva és meghúzva, a folyadék kiszivároghat a csőből.

b. Óvatosan húzza ki a zárt gyűjtőcsövet a csőtartóból. **(14. ábra)**

c. Húzza le a WC-t a lehúzható mintagyűjtő papírral együtt. **(15. ábra)**

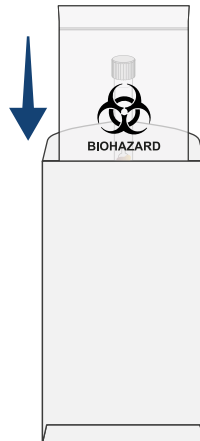
**(13. ábra)****(14. ábra)****(15. ábra)**

7. LÉPÉS: A MINTAGYŰJTŐ CSŐ VISSZAKÜLDÉSE A SZÉKLETMINTÁVAL

- Rakja be a mintagyűjtő csövet a biohazard zsákba. **(16. ábra)**
- Zárja le a biohazard zsákot, és tegye azt a minta visszaküldésére szolgáló borítékba. **(17. ábra)**
- Kövesse a visszaküldési útmutatót, és olvassa el az elérhetőségi adatokat a csomag visszaküldéséhez.
 - Győződjön meg arról, hogy a székletmintát a mintavételt követő 24 órán belül visszaküldi.**



(16. ábra)



(17. ábra)

ÁLTALÁNOS TERMÉKNÉV

Széketminta gyűjtő készlet.

A KÉSZLET MÉRETE

Gyűjtőkészletenként 1 teszt.

KATALÓGUSSZÁM

MFG010042

ESZKÖZ RENDELTETÉSE

Ez a mintagyűjtő készlet emberi székletminták gyűjtésére, szállítására és tárolására szolgál. Nem automatizált. A készlet laikus felhasználók számára készült a székletminta gyűjtésére és elküldésére egy klinikai laboratóriumba *in vitro* diagnosztikai vizsgálat céljából.

A VIZSGÁLAT ELVE

Ezt a terméket emberi székletminták gyűjtésére, szállítására és tárolására tervezték. A csőben lévő tartósító folyadék <30% nátrium-klorid oldatot (NaCl) és egyéb összetevőket tartalmaz. A tartósító oldat a pH beállításával és a magas sóionokkal képes gátolni a DNS lebomlását és gátolja a baktériumok szaporodását.

A MINTAGYŰJTŐ KÉSZLET ELEMEI

ÁLTALÁNOS TERMÉKNÉV	MENNYISÉG	LEÍRÁS
Használati útmutató	1	Magyar nyelvű használati útmutató a mintagyűjtő készlethez.
Műanyag mintagyűjtő kanál	1	A kanál és a nyele leválaszthatóak egymásról.
Mintagyűjtő papírok	2	/
Mintagyűjtő cső	4 mL tartósító folyadékot tartalmaz, 1 gyűjtőcső	A csőben lévő tartósító folyadék <30% nátrium-klorid (NaCl) oldatot tartalmaz.
Biohazard zsák	1	/
Minta visszaküldési boríték	1	/

GYŰJTŐKÉSZLET TÁROLÁSI FELTÉTELEI ÉS SZAVATOSSÁGI IDEJE HASZNÁLAT ELŐTT

Kérjük tárolja a székletminta gyűjtő készletet 2-30°C-on. A termék szavatossági ideje 24 hónap. Használat előtt ellenőrizze, hogy a készlet nem járt-e le. Ellenőrizze, hogy a gyűjtőcső kiszállításkor zárva van-e. A gyűjtőcső kinyitása után a tartósító folyadék 2-30°C-on tárolva 6 hónapig áll el. Kérjük tartsa távol a készletet hőtől és közvetlen napfénytől. Ügyeljen arra, hogy a készletet gyermekektől távol tartsa.

GYŰJTŐKÉSZLET TÁROLÁSI FELTÉTELEI HASZNÁLAT UTÁN

Kérjük, hogy a székletmintagyűjtő készletet a mintavételt követő 24 órán belül küldje vissza. A mintát a laboratóriumban a gyűjtés napjától számított legfeljebb hét napon belül meg kell vizsgálni, beleértve a minta szállítására szánt időt is. Ezek a feltételek a 2-30°C-on tárolt és szállított mintákra vonatkoznak.

MINTASZÁLLÍTÁS

Kérjük, hogy a mintát a lehető leghamarabb, a mintavétel után legfeljebb 24 órával küldje vissza.

MINTATÁROLÁS A VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUMBA VALÓ ÉRKEZÉS UTÁN

A mintákat a mintavétel napjától hét napig szobahőmérsékleten lehet tárolni, beleértve a minta szállítására szánt időt is. Hét nap elteltével a mintát laboratóriumban, alacsony hőmérsékleten (-20°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten) kell tárolni legfeljebb 12 hónapig.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ez a termék nem használható fel újra.
- Ez a termék csak székletminták gyűjtésére, szállítására és tárolására alkalmas.
- A gyűjtőcsőben lévő folyadék nem alkalmas emberi fogyasztásra. Ha lenyelte, kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha a folyadék szembe vagy bőrre kerül, öblítse le a területet bő vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ne öntse ki a folyadékot a gyűjtőcsőből.
- Tartsa távol a gyűjtőkészletet gyermekektől.

ELÉRHETŐSÉGEK

Gyártó

BGI Europe A/S.

Gyártó címe

Symfonivej 34, 2730 Herlev, Dánia

Elérhetőségek

Szerviz forródrót: Herlev, Dánia: 0045-70260806

Weboldal: www.bgi.com/global

Gyártóhely

BGI Biotechnology (Wuhan) Co., Ltd.

Telephely címe:

Building B2, B1, Zone B/C/D, Wuhan National Bioindustry Base, No.666, Gaoxin, Avenue, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430075, Kína

Megjelenési dátum

Ez a kézikönyv 2024-03-01-én jelent meg.

Dokumentum verzió	Felülvizsgálat dátuma	Leírás
V1.0	2024-03-01	Első kiadás

	CE jelzés
	In vitro diagnosztikai orvosi készülék
	Gyártó
	N vizsgálathoz elegendőt tartalmaz
	Hőmérséklet korlátozás
	Gyártás dátuma
	Használati dátum
	Katalógusszám
	Tétel szám
	Olvassa el a használati utasításokat
	Ne használja újra
	Napfénytől tartsa távol
	Tartsa szárazon

Széketminta gyűjtő készlet

Gyártó címe

Symfonivej 34, 2730 Herlev, Dánia

Weboldal: www.bgi.com/global